


IUB™
Nitroděložní kulička
 NITRODĚLOŽNÍ TĚLÍSKO IUB™ SCu300B MIDI

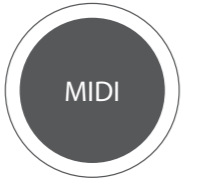

INFORMACE PRO PACIENTKY

Nitroděložní tělísko IUB™ SCu300B MIDI se používá k prevenci otěhotnění.

Není ochranou před infekcí HIV (AIDS) ani jinými pohlavně přenosnými chorobami.

Dříve, než se rozhodnete pro nitroděložní tělísko IUB™ SCu300B MIDI, je důležité, abyste porozuměla této brožuře a promluvila jste si o ní se svým lékařem. Měla byste se též seznámit s dalšími antikoncepčními metodami, které pro vás mohou být vhodné.

Co je tělísko IUB™?

IUB™ je tělísko uvolňující měď, které se až na dobu 5 let zavádí do dělohy k zabránění otěhotnění. IUB™ je určeno pro ženy ve věku alespoň 15 let.

IUB™ se skládá z kostry vyrobené z paměťové slitiny (nitinolu), která má tvar koule o průměru 15 mm. Tato kostra je potažena měďí.

Ke konci kostry jsou upevněna dvě vlákna. Vlákna jsou jedinou součástí IUB™, kterou můžete cítit, když máte tělísko zavedeno v děloze.

IUB™ a jeho součásti neobsahují latex.

Jak dlouho mohu mít IUB™ zavedeno?

IUB™ můžete mít v děloze až po dobu 5 let. Po 5 letech by vám měl váš lékař IUB™ vyjmout. Pokud si to budete přát a tělísko IUB™ pro vás bude i nadále vhodné, může vám být při stejné návštěvě zavedeno nové.

Co když změním názor a budu chtít otěhotnět?

Váš lékař vám může IUB™ kdykoli vyjmout. Po vynětí IUB™ je jeho antikoncepční účinek odstraněn.

Jak IUB™ funguje?

Obecně přijímané teorie, jak funguje IUB™, říkají, že brání spermii v dosažení vajíčka, brání oplodnění vajíčka a brání vajíčku v zahnízdění v děloze. IUB™ nebrání každý měsíc vaječníkům ve tvorbě vajíček (ovulaci).

Kdo může IUB™ používat?

Pro IUB™ se můžete rozhodnout, pokud byste:

- chtěla antikoncepci, která je velmi účinná,
- chtěla antikoncepci, která přestane působit, když ji přestanete používat,
- chtěla antikoncepci, jejíž použití je snadné,
- nechtěla jako antikoncepci užívat syntetické hormony.

Kdo by IUB™ neměl používat?

IUB™ byste neměla používat, pokud:

- můžete být těhotná,

- máte dělohu abnormálního tvaru,

- máte pánevní infekci, která se nazývá zánětlivé onemocnění pánve (ZOP), nebo se v současné době chováte tak, že vám hrozí vyšší riziko zánětlivého onemocnění pánve (například proto, že vy nebo váš partner máte pohlavní styk s více partnery/partnerkami),

- jste v uplynulých 3 měsících měla děložní infekci po těhotenství nebo potratu,

- máte rakovinu dělohy nebo děložního čípku,

- máte nevysvětlené krvácení z pochvy,

- máte infekci děložního čípku,

- máte Wilsonovu chorobu (poruchu zpracování mědi tělem),

- jste alergická na kterýkoli z materiálů tělíska,

- již máte v děloze nitroděložní antikoncepci.

Jak se IUB™ do dělohy zavádí?

IUB™ se do dělohy zavede během návštěvy v ordinaci. Váš řádně zaškolený lékař vás nejdříve vyšetří, aby zjistil polohu dělohy. Poté vám vydezinfikuje pochvu a děložní čípek, změří vám dělohu a zasune do ní plastový zavaděč obsahující IUB™. Následně lékař zavaděč vyjme a ponechá vám IUB™ v děloze. Do pochvy vám budou vyčínávat dvě modrá vlákna. Lékař vlákna zastříhne, aby na minimum omezil nepohodlí. Při zavádění IUB™ můžete pociťovat křeče nebo štípání. Některé ženy mohou omdlít nebo mohou několik minut poté pociťovat nevolnost či závratě. Použití analgetika před zavedením je na uvážení pacienta a lékaře.

Váš lékař vás může požádat, abyste před odchodem z ordinace chvíli ležela.

IUB™ by měl odstranit pouze lékař. Vynětí se provádí zatažením za vlákna prostředku.

Jak ověřím, že mám IUB™ v děloze?

Po zavedení IUB™ docházejte na kontroly k lékaři zhruba jednou za měsíc, aby bylo jisté, že máte tělísko stále v děloze. Pokud je IUB™ na nesprávném místě, zvyšuje se šance, že otěhotníte. Pokud nemůžete svého lékaře hned navštívit, používejte další antikoncepční metodu.

V době zavedení IUB™ můžete používat tampony.

Co se stane, pokud v době, kdy mám zavedené tělísko IUB™, otěhotním?

Pokud se domníváte, že jste těhotná, ihned se obraťte na svého lékaře. Pokud jste těhotná a máte v děloze IUB™, může se u vás vyvinout těžká infekce nebo šok, můžete potratit nebo předčasně porodit a můžete i zemřít. Vzhledem k těmto rizikům vám lékař doporučí vynětí IUB™, i když odstranění tělíska může způsobit potrat.

Pokud budete v těhotenství pokračovat se zavedeným IUB™, pravidelně navštěvujte svého lékaře. Pokud u vás nastane horečka, zimnice, křeče, bolesti, krvácení, příznaky podobné chřipce nebo nezvyklý zápachjící poševní výtok, ihned se obraťte na svého lékaře.

U těhotenství se zavedeným tělískem IUB™ existuje větší než obvyklá pravděpodobnost, že půjde o mimoděložní těhotenství. Mimoděložní těhotenství je akutní situace, která může vyžadovat chirurgický zákrok. Mimoděložní těhotenství může vyvolat vnitřní krvácení, neplodnost a smrt. Neobvyklé poševní krvácení nebo bolest břicha mohou být známkou mimoděložního těhotenství. Zdá se, že měď v IUB™ nevyvolává vrozené vady.

Jaké nežádoucí účinky mohu u IUB™ očekávat?

Mezi nejčastější nežádoucí účinky IUB™ patří silnější, delší menstruace a špinění mezi periodami; většina těchto nežádoucích účinků se po 2-3 měsících sníží. Pokud však vaše menstruační krvácení bude i nadále silné nebo dlouhé nebo pokud bude špinění pokračovat, obraťte se na svého lékaře.

Zřídka se mohou vyskytnout závažné nežádoucí účinky:

- Zánětlivé onemocnění pánve (ZOP): nitroděložní tělíska i tělíska IUB™ jsou méně často spojena se zánětlivým onemocněním pánve. ZOP je infekce dělohy, vejcovodů a okolních orgánů. Vznik ZOP je nejpravděpodobnější během prvních 20 dnů po zavedení tělíska. Máte vyšší pravděpodobnost onemocnět ZOP, pokud máte vy nebo váš partner pohlavní styk s více partnery. ZOP se léčí antibiotiky. ZOP však může způsobit vážné problémy, jako je neplodnost, mimoděložní těhotenství a chronická pánevní bolest. Ve vzácných případech může ZOP způsobit i smrt. Závažnější případy ZOP vyžadují chirurgický zákrok nebo hysterektomii (odstranění dělohy). obraťte se na svého lékaře ihned, pokud se u vás projeví jakékoli příznaky ZOP: bolest břicha nebo pánevní bolest, bolest při pohlavním styku, neobvyklý nebo páchnoucí poševní výtok, zimnice, silné krvácení nebo horečka.

- Obtížné vynětí: někdy může být vynětí tělíska IUB™ obtížné, protože tělísko uvizne v děloze. Pro odstranění IUB™ může být někdy nutná hysteroskopie.

- Perforace: ve vzácných případech IUB™ pronikne děložní stěnou, a to zejména při zavádění. To se nazývá perforace. Pokud tělísko IUB™ perforuje dělohu, je nutné jeho odstranění. Může být nutný chirurgický zákrok. Pokud kojíte nebo jste během 36 týdnů před zavedením porodila, existuje větší riziko perforace děložní stěny tělískem. Perforace může způsobit infekci, zjizvení nebo poškození dalších orgánů. Pokud tělísko IUB™ perforuje dělohu, nejste chráněna před otěhotněním.

- Vypuzení: IUB™ může částečně nebo úplně vyjít z dělohy. To se nazývá vypuzení. U žen, které nikdy nebyly těhotné, může existovat vyšší pravděpodobnost vypuzení IUB™ než u žen, které již těhotné byly. Jestliže se domníváte, že IUB™ částečně nebo úplně vystoupilo z dělohy, používejte další antikoncepční metodu, jako je kondom, a obraťte se na svého lékaře. Nezavádějte znovu již použité IUB™.

IUB™ u vás může vyvolat další nežádoucí účinky. Například se u vás může projevit anémie (nízký počet červených krvinek), bolest zad, bolest při pohlavním styku, menstruační křeče, alergická reakce, poševní infekce, poševní výtok, mdloby nebo bolest. Pohlavní partner může trpět nepohodlím způsobeným vyjímacími vlákny.

Pracovníci provádějící zobrazovací vyšetření magnetickou rezonancí (MR) musejí být před vyšetřením informováni o přítomnosti IUB™.

Tento přehled nežádoucích účinků není kompletní. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se nežádoucího účinku, poraďte se se svým lékařem.

Kdy mám navštívit svého lékaře?

Svého lékaře navštivte, pokud budete mít jakékoli obavy související s IUB™.

Navštivte ho, pokud:

- se domníváte, že jste těhotná,

- trpíte pánevní bolestí nebo bolestí během pohlavního styku,

- máte neobvyklý poševní výtok nebo léze na genitáliích,

- máte horečku nevysvětleného původu,

- můžete být vystavena pohlavně přenosným chorobám,









- můžete cítit jakoukoli jinou část IUB™ kromě vláken,

- se vy nebo váš partner stanete HIV pozitivními,

- máte silné nebo dlouhodobé poševní krvácení,

- vám vynechá menstruace.

Tato brožura obsahuje souhrn nejdůležitějších informací o IUB™. Pokud byste chtěla získat další informace, obraťte se prosím na svého lékaře. Svého lékaře můžete požádat o informace o IUB™, které jsou určeny pro zdravotnické pracovníky.

	Určeno pouze k jednorázovému použití.
	Sterilizováno etylenoxidem.
	Neprovádějte resterilizaci.
	Nepoužívejte, je-li obal poškozený nebo otevřený.
	Balení obsahuje jeden kus.
	Čtěte návod k použití.
	Upozornění. S tímto prostředkem souvisejí zvláštní opatření, která naleznete v návodu k použití.
	Po použití obal recyklujte.

	Zástupce pro Evropu: MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany Tel.: +49 511 6262 8630 Fax: +49 511 6262 8633
IUB™ je ochranná známka společnosti OCON Medical Ltd. www.oconmed.com	Výrobce: OCON Medical Ltd. 15 Hashdera Hamerkazit POB 552, Modiin 7171801, Israel Tel.: +972 72 21 50 105
	Distributor v České republice: AXONIA, a.s. Bydžovská 185 190 14 Praha 9 www.axonia.cz