

# Cicatridina®

NÁZEV PŘÍPRAVKU: CICATRIDINA SPREJ

**SLŮŽENÍ:** Sodná sůl kyseliny hyaluronové, škrobový oktenylsukcinát hlinitý, hexametyldisiloxan, olej ze sladkých mandlí, vitamin E acetat, kyselina ximenová, citrónový esenciální olej z čajovníku australského, butan, izobutan, propan. **BALENÍ:** Jedná nádoba obsahuje 125 ml spreje. **KLINICKÉ INFORMACE:** Indikace: Pomocná léčba při procesech hojení povrchových a hlubokých ran (oděry, popáleniny, operační rány, proleženiny a vředy) jakéhokoliv původu. **Způsob užívání:** Místo, které má být ošetřeno před každou aplikací důkladně očistěte. **Nádoby před použitím dobře protřepejte, aby se prášek rozpůlil.** Nádoby držte svisle, aplikujte sprej ze vzdálenosti 10-15 cm přímo na místo, které má být ošetřeno. Opakujte 2krát až 3krát denně. **Kontraindikace:** Známa přecitlivělost na složky. **Interakce s jinými přípravky:** Nepoužívejte současně s jinými zdravotnickými prostředky nebo léky bez předchozí konzultace s lékařem. **Těhotenství a laktace:** Nejsou známy žádné kontraindikace. **Riziko dopravních prostředků a obsluha strojů:** Nemá vliv. **Předávkování:** Případy předávkování nejsou známy. **Nežádoucí účinky:** Používání všech přípravků k lokálnímu použití, zejména je-li dlouhodobé, může způsobit senzibilizaci. Pokud k tomu dojde, nebo v případě zjištění jiných nežádoucích účinků, přerušete léčbu a poraďte se s lékařem o zahájení vhodné léčby. **VYSTRÁHA:** Varování. Hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zápalení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zápalení. Nepropíchněte nebo nespáľte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabráňte styku s očima. Přípravek nepolykejte. Doba použitelnosti se vztahuje na neotevřený a správně skladovaný přípravek. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na spodní straně obalu nebo pokud je obal otevřen nebo poškozen.

Zdravotnický prostředek CE 0373

NÁZEV PŘÍPRAVKU: CICATRIDINA MAST

**SLŮŽENÍ:** Sodná sůl kyseliny hyaluronové, voda, tekutý parafin, cetylstearylalkohol, olej ze sladkých mandlí, polyoxyetylen stearyléter, glycerin, sorbitol, silikonový olej, chlorhexidin diglukonát, imidazolidinyloláová močovina, dvojsodná sůl EDTA, BHT. **BALENÍ:** Balení masti CICATRIDINA® obsahuje jednu tubu s 30 g. **KLINICKÉ INFORMACE:** **PŮSOBA A DŮVODY PRO POUŽITÍ:** Masti CICATRIDINA® působí díky přítomnosti kyseliny hyaluronové, mukopolysacharidu, který je hojně distribuován v mnoha tělesných tkáních. Kyselina hyaluronolová slouží jako strukturální podpora a přináší tak tkáním napětí, živý a pružnost. Četné klinické studie prokázaly schopnost kyseliny hyaluronové urychlit a zlepšit proces reepitelizace a obnovy tkáně. **Indikace:** Pomocná léčba při procesech hojení povrchových a hlubokých ran (oděry, tržné rány, popáleniny, operační rány, proleženiny a vředy) jakéhokoliv původu. **Kontraindikace:** Důvodem pro nepoužívání masti je individuální přecitlivělost na některou ze složek produktu. **Těhotenství a laktace:** Bezpečnost použití masti CICATRIDINA® v průběhu těhotenství a kojení nebyla prokázána. Za těchto okolností je vhodné kontaktovat vašeho lékaře. **Riziko dopravních prostředků a obsluha strojů:** Nemá vliv. **Interakce s jinými produkty:** Interakce s jinými produkty nejsou známy, proto je před použitím masti CICATRIDINA® současně s jinými zdravotnickými prostředky nebo léky k lokálnímu použití vhodné kontaktovat lékaře. **Návod k použití:** Před každou aplikací důkladně očistěte místo, které má být ošetřeno. Naneste na neotevřené místo 2krát až 3krát denně jemnými masážními pohyby. V případě potřeby překryjte gázou. Z hygienického hlediska je správné si umýt ruce před a po použití zdravotnického prostředku. **Doba a délka aplikace:** Aplikujte 2krát až 3krát denně, nebo podle lékařského předpisu. Délka použití závisí na vývoji přípravku; v případě potřeby se masti CICATRIDINA® může používat dlouhodobě. **Nežádoucí účinky:** Zvláště prodloužené používání všech místně aplikovaných přípravků může vést k projevům přecitlivělosti. V těchto případech léčbu přerušete a poraďte se svým lékařem za účelem zahájení vhodné léčby. Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, které nejsou popsány v tomto přílohovém listku, informujte svého lékaře nebo lékárníka. **Doba použitelnosti a skladování:** Datum použitelnosti je uvedeno na obalu (EXP) a vztahuje se na produkt v neotevřeném a správně skladovaném obalu. Nepoužívejte po datu vyznačeném na obalu, nebo pokud je obal otevřen nebo poškozen. Uchovávejte zdravotnický prostředek dobře uzavřený, mimo světla a tepla.

Zdravotnický prostředek CE 0373

1. Voinchet V, Vasseur P, Kern J. Efficacy and safety of hyaluronic acid in the management of acute wounds. Am J Clin Dermatol.2006;7:353-357  
2. Silva, J., Minárik, J., NEUMM, (1-2) 2009, 76-79.

**axonia**  
PHARMA

**Výrobce:**

FARMA-DERMA srl - Via dell'Artigiano 6-8  
40010 Sala Bolognese (BO), Itálie

**Distributor:**

AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha 9,  
Česká republika, www.axonia.cz,  
email: info@axonia.cz, tel. +420 224 240 832

Razítko lékární, kde můžete Cicatridina mast a sprej zakoupit

Výhodné balíčky produktů je možné nakoupit i na  
[eshop.axonia.cz](http://eshop.axonia.cz)

# Cicatridina®

mast a sprej

## ROZDÍL V HOJENÍ POZNÁTE SAMI

- Až o 70% rychlejší proces hojení<sup>1</sup>
- Ochrana před jizvením ran<sup>2</sup>
- Ideální prostředí pro vlhké hojení<sup>2</sup>

Vysoký  
obsah kyseliny  
hyaluronové



BEZ LÉKAŘSKÉHO  
PŘEDPISU



# Cicatrídina®

## OBSAHUJE KYSELINU HYALURONOVOU

### KYSELINA HYALURONOVÁ

je přirozenou součástí lidského těla.

Lidské tělo o hmotnosti 70 kg obsahuje přibližně 15 g kyseliny hyaluronové.


Celkem 55 % z celkového obsahu kyseliny hyaluronové v lidském těle se nachází v pokožce, kde díky své schopnosti vázat vodu přispívá k dokonalé hydrataci pleti.

Kyselina hyaluronová zajišťuje optimální organizaci pojivové tkáně v místě poranění, jednoduše řečeno urychluje proces hojení až o 70 %<sup>1</sup>

Kyselina hyaluronová díky svým výjimečným schopnostem nachází mnohostranné uplatnění ve farmaceutickém i kosmetickém průmyslu, v oční chirurgii, při artroskopických operacích, v plastické chirurgii, atd.

### HOJENÍ RAN A ROLE KYSELINY HYALURONOVÉ

- Významně zkracuje dobu hojení<sup>1</sup>
- Zabraňuje vzniku jizev<sup>2</sup>
- Urychluje tvorbu granulární tkáně<sup>2</sup>
- Urychluje obnovu epitelu<sup>2</sup>
- Udrží příznivé mikroklima pro vlhké hojení

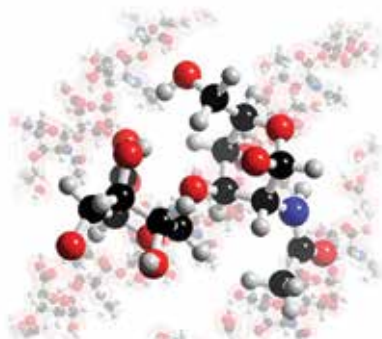

# Cicatrídina®

## URYCHLUJE HOJENÍ RAN

### INDIKACE

- Hojení ran jakéhokoli původu
- Operační rány (čerstvě zažité i po vytažení stehů)
- Oděrky a tržné rány
- Proleženiny
- Po odstranění genitálních bradavic (kondylomat)
- Popáleniny I. a II. stupně (také po radioterapii)
- Vředy (např. bércový vřed, diabetická noha)
- Opruzeniny pod prsy, v oblasti mezi hýžděmi „vlk“, dětské opruzeniny
- Popraskané prsní bradavky v období kojení
- Epiziotomie (nástřih při porodu)
- Spáleniny po opalování apod.



Mast neobsahuje parfemaci.  
Mast i sprej jsou bezpečné pro dětskou pokožku.

### APLIKACE

#### masti Cicatrídina®:



1. Ošetřované místo před každou aplikací důkladně očistěte a případně desinfikujte.



2. Aplikujte mast v tenké vrstvě na celou spodinu rány **dvakrát až třikrát denně**.



3. Ošetřené místo překryjte sterilním polštářkem a obvazem. Opruzeniny, spáleniny po opalování, nebo drobné rány není nutné kryt sterilním obvazem.

### APLIKACE

#### spreje Cicatrídina®:



1. Ošetřované místo před každou aplikací důkladně očistěte od mechanických nečistot. Infikované rány desinfikujte.



2. Nádobu před použitím dobře protřepejte, **až uslyšíte zvuk kulíčky!** Tak se prášek v nádobě rozptýlí.



3. Nádobu držte dnem dolů. **Aplikujte sprej ze vzdálenosti 10-15 cm** na ošetřované místo. Aplikaci opakujte **2krát až 3krát denně**.



### KDY JE VÝHODNĚJŠÍ POUŽÍT sprej Cicatrídina®?

- Ideální pro pokrytí velké plochy rány bezbolestným a hygienickým způsobem.
- Krytí obtížně dostupných míst – mezi prsty nebo na kloubech.
- Pro secernující, čerstvě a citlivější rány.