

# Cicatridina®

NÁZOV PRÍPRAVKU: CICATRIDINA® SPREJ

**ZLOŽENIE:** Sodná soľ kyseliny hyalurónovej, škrobový oktenylsukcinát hliníty, hexametyldisiloxán, olej zo sladkých mandlí, vitamín E acetylát, kyselina ximenová, citrónový esenciálny olej, esenciálny olej z čajovníka austrálskeho, bután, izobután, propán. **BALENIE:** Nádobu so 125 ml spreja. **INDIKÁCIE:** Pomocná liečba pri procesoch hojenia povrchových a hlbokých rán (odreniny, popáleniny, operačné rany, preležaniny a vredy) akéhokoľvek pôvodu. **POUŽITIE:** Miesto, ktoré má byť ošetrované pred každou aplikáciou dôkladne očistite. **Nádobu pred použitím dobre pretrepte, aby sa prášok rozptýlil.** Nádobu držte zvisle, aplikujte sprej zo vzdialenosti 10-15 cm priamo na miesto, ktoré má byť ošetrované. Opakujte 2-3krát denne. **KONTRAINDIKÁCIE:** Známa precitlivosť na zložky. **INTERAKCIE:** Nepoužívajte súčasne s inými zdravotníckymi pomôckami alebo liekmi bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom. **TEHOTENSTVO A DOJČENIE:** Nie sú známe žiadne kontraindikácie. **NEŽIADUCE ÚČINKY:** Používanie všetkých prípravkov na lokálne použitie, najmä ak je dlhodobé, môže spôsobiť senzibilizáciu. Ak k tomu dôjde, alebo v prípade zistenia iných nežiaducich účinkov, prerušte liečbu a poraďte sa s lekárom o začatí vhodnej liečby. **VYSTRACHA:** Horľavý aerosól. Nádobu je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. Neprepichujte alebo nespalujte ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte styku s očami. Prípravok neprehrievajte. Dátum expirácie sa vzťahuje na neotvorený a správne skladovaný prípravok. Nepoužívajte prípravok po dátume expirácie uvedenom na spodnej strane obalu alebo ak je obal otvorený alebo poškodený.

Zdravotnícka pomôcka CE0373

NÁZOV PRÍPRAVKU: CICATRIDINA® MÁST

**ZLOŽENIE:** Sodná soľ kyseliny hyalurónovej, voda, tekutý parafín, cetylsterýlalkohol, olej zo sladkých mandlí, polyoxyetylén stearyléter, glycerín, sorbitol, silikónový olej, chlórhexidín diglukonát, imidazolindinylová močovina, dvojsodná soľ EDTA, BHT. **BALENIE:** Tuba s 30 g masti. **POUŽITIE:** Mast Cicatridina® pôsobí vďaka prítomnosti kyseliny hyalurónovej, mukopolysacharidu, ktorý je hojne distribuovaný v mnohých telesných tkanivách. Kyselina hyalurónová slúži ako štruktúrna podpora a prispieva tak tkanivám napätie, výživu a pružnosť. Početné klinické štúdie preukázali schopnosť kyseliny hyalurónovej urýchliť a zlepšiť proces reepitelizácie a obnovy tkanív. **INDIKÁCIE:** Pomocná liečba pri procesoch hojenia povrchových a hlbokých rán (odreniny, trzné rany, popáleniny, operačné rany, preležaniny a vredy) akéhokoľvek pôvodu. **KONTRAINDIKÁCIE:** Precitlivosť na niektorú zo zložiek produktu. **TEHOTENSTVO A DOJČENIE:** Bezpečnosť použitia v priebehu tehotenstva a dojčenia nebola preukázaná. Za týchto okolností je vhodné kontaktovať vášho lekára. **INTERAKCIE:** nie sú známe. **NAVOD NA POUŽITIE:** Pred každou aplikáciou dôkladne očistite miesto, ktoré má byť ošetrované. Naneste masť na postihnuté miesto 2-3krát denne jemnými masážnymi pohybmi. V prípade potreby prekryte gázou. Z hygienického hľadiska je správne si umyť ruky pred a po použití zdravotníckej pomôcky. Dĺžka použitia závisí od vývoja príznakov; v prípade potreby sa masť Cicatridina® môže používať dlhodobo. **NEŽIADUCE ÚČINKY:** Zvlášť predĺžené používanie všetkých lokálne aplikovaných prípravkov môže viesť k prejavom precitlivosťi. V týchto prípadoch liečbu prerušte a poraďte so svojim lekárom o začatí vhodnej liečby. Ak sa vyskytnú nežiaduce účinky, ktoré nie sú popísané v tomto príbalovom letáku, informujte svojho lekára alebo lekárku. **DOBA POUŽITELNOSTI A SKLADOVANIE:** Nepoužívajte po dátume vyznačenom na obale, alebo ak je obal otvorený alebo poškodený. Uchovávajte zdravotnícku pomôcku dobre uzavretú, mimo svetla a tepla.

Zdravotnícka pomôcka CE0373

1. Voinchet V, Vasseur P, Kern J. Efficacy and safety of hyaluronic acid in the management of acute wounds. Am J Clin Dermatol. 2006;7:353-357  
2. Sliva, J., Minárik, J., NEUMM, (1-2) 2009, 76-79.

**axonia**  
P H A R M A

**Výrobca:**

FARMA-DERMA srl - Via dell'Artigiano 6-8  
40010 Sala Bolognese (BO), Itálie

**Výhradný distribútor pre ČR a SR:**

AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha 9,  
Česká republika, www.axonia.sk,  
email: info@axonia.sk

Pečiatka lekárne, kde môžete nakúpiť odporúčané produkty

Výhodné balíčky produktov je možné nakúpiť aj na  
[eshop.axonia.sk](http://eshop.axonia.sk)

# Cicatridina®

masť a sprej

## ROZDIEL V HOJENÍ POZNÁTE SAMI

- Rýchlejšie hojenie<sup>1</sup>
- Prevencia vzniku jaziev<sup>2</sup>
- Základná výbava do každej lekárníčky!

Vysoký  
obsah kyseliny  
hyalurónovej



BEZ LEKÁRSKEHO  
PREDPISU



### KYSELINA HYALURÓNOVÁ

je prirodzenou súčasťou ľudského tela.

Ľudské telo s hmotnosťou 70 kg obsahuje približne 15 g kyseliny hyaluronovej.


Celkom 55 % z celkového obsahu kyseliny hyaluronovej v ľudskom tele sa nachádza v pokožke, kde vďaka svojej schopnosti viazať vodu prispieva k dokonalej hydratácii pleti.

Kyselina hyaluronová zabezpečuje optimálnu organizáciu spojivového tkaniva v mieste poranenia, jednoducho povedané urýchľuje proces hojenia až o 70 %.<sup>1</sup>

Kyselina hyaluronová vďaka svojim výnimočným schopnostiam nachádza mnohostranné uplatnenie vo farmaceutickom aj kozmetickom priemysle, v očnej chirurgii, pri artroskopických operáciách, v plastickej chirurgii, atď.

### HOJENIE RÁN A ÚLOHA KYSELINY HALURÓNOVEJ

- Významne skracuje dobu hojenia<sup>1</sup>
- Zabraňuje vzniku jaziev<sup>2</sup>
- Urýchľuje tvorbu granuláčného tkaniva<sup>2</sup>
- Urýchľuje obnovu epitelu<sup>2</sup>
- Udržiava priaznivú mikroklimu pre vlhké hojenie

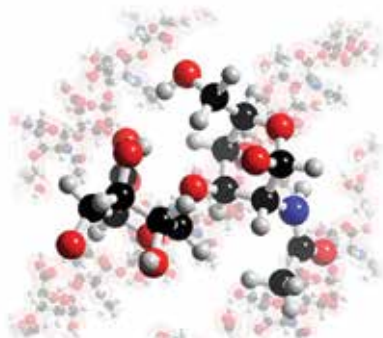

### INDIKÁCIE

- Hojenie rán akéhokoľvek pôvodu
- Operačné rany (čerstvo zašité aj po vytiahnutí stehov)
- Odreniny a tržné rany
- Preležaniny
- Po odstránení genitálnych bradavíc (kondylómov)
- Po ošetrovaní peelingom, epiláciou a laserom
- Popáleniny I. a II. stupňa (tiež po rádioterapii)
- Vredy (napr. vred predkolenia, diabetická noha)
- Zapareniny pod prsními, v oblasti medzi sedacími svalmi (na zadku), detské zapareniny
- Popraskané prsné bradavky v období dojčenia
- Epiziotómia (nástrih hrádze pri pôrode)
- Spáleniny po opaľovaní apod.



Masť neobsahuje parfumáciu. Masť aj sprej sú bezpečné pre detskú pokožku.

### APLIKÁCIA masť Cicatridina®:



1. Ošetrované miesto pred každou aplikáciou dôkladne očistite a prípadne dezinfikujte.



2. Aplikujte masť v tenkej vrstve na celú spodinu rany **dvakrát až trikrát denne**.



3. Ošetrované miesto prekryte sterilným vankúšikom a obväzom. Zapareniny, spáleniny po opaľovaní, alebo drobné rany nie je nutné kryť sterilným obväzom.

### APLIKÁCIA spreja Cicatridina®:



1. Ošetrované miesto pred každou aplikáciou dôkladne očistite od mechanických nečistôt. Infikované rany dezinfikujte.
2. Nádobu pred použitím dobre pretrepte, **kým nebudete počuť zvuk guľôčky!** Vtedy je prášok v nádobe dobre rozptýlený.



3. Nádobu držte dnom nadol. **Aplikujte sprej zo vzdialenosti 10-15 cm** na ošetrované miesto. Aplikáciu opakujte **2-3krát denne**.



### KEDY JE VÝHODNEJŠIE POUŽÍŤ sprej Cicatridina®?

- Ideálny pre pokrytie veľkej plochy rany bezbolestným a hygienickým spôsobom.
- Krytie ťažko dostupných miest- medzi prstami alebo na kĺboch.
- Pre sčernujúce, čerstvé a citlivejšie rany.